

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

FLEXISEQ[®]

(Sequessome Tehnoloogiat[®] sisaldav geel)

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Küsimuste korral pöörduge arsti või apteekri poole.

1. Koostis

Aqua, Phosphatidylcholine, Alcohol, Glycerin, Carbomer, Polysorbate 80, Disodium Phosphate, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Methylparaben, Ethylparaben, Linalool, Disodium EDTA, Sodium Phosphate, Sodium Metabisulfite, BHT.

2. Väljanägemine ja pakendi sisu

- Flexiseq on valge või kollakas geel 50-grammises tuubis.

3. Ettenähtud kasutus

- Flexiseq määrab liigestevahelist kõhre, et vähendada valu ja jäikust ning parandada halvenenud liigesetalitust, mida seostatakse osteoartriidi kõikide etappidega.

4. Ettevaatusabinõud ja turvameetmed

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

4.1 Ärge kasutage Flexiseq'i...

- kui olete allergiline (ülitundlik) Flexiseq'i mõne koostisosaga suhtes.
- lahtistel haavadel, katkisel või põletikulisel nahal või limaskestadel (kehaõõnsuste, nagu suu, nina või silmade ääred).

4.2 Rasedus ja imetamine

- Flexiseq'i pole kliinilistes uuringutes rasedate naiste peal testitud ja seega pole geeli kasutamine raseduse ajal soovitatav, välja arvatud juhul, kui arst seda vajalikuks peab.
- Ei ole teada, kas Flexiseq on imetamise ajal lapsele ohtlik. Enne toote kasutamist küsige nõu arstilt või apteekrilt.

4.3 Kasutamine lastel

- Flexiseq'i pole veel laste peal testitud. Lastel kasutamisel küsida nõu arstilt.

5. Kuidas Flexiseq'i kasutada

- Flexiseq on mõeldud ainult välispidiseks kasutuseks, vältige kontakti silmadega. Kui toode satub silma, loputage koheselt puhta veega.
- Kui arst pole soovitanud teisiti, kasutage kaks korda päevas, hommikul ja õhtul liigest ümbritseval alal. Kandke peale vastavale liigesele sobiv kogus geeli:
 - põlve, õla või puusa korral nimetissõrme-pikkune joon.
 - hüppeliigese, randme või ühe käe sõrmede korral poole nimetissõrme pikkune joon.
- Tähtis on leida sobiv kogus määritava liigese jaoks.
- Pärast geeli kasutamist peske käsi.
- Enne määratud koha kinnikatmist tuleb sel lasta kuivada. Selle tegematajätmine vähendab toote efektiivsust.
- Laske pealekantud Flexiseq geelil enne kinnikatmist vähemalt 10 minutit kuivada või kuni määratud piirkond on puudutamisel kuiv.
- Kui geelil kulub kuivamiseks kauem kui 10 minutit, siis kasutasite liiga palju geeli ja peaksite järgmine kord vähem kasutama.
- Kui kuivamiseks kulub vähem kui 10 minutit, peaksite järgmine kord kasutama rohkem geeli.
- Kuivamisaja vähendamiseks:
 - soojendage enne geeli kasutamist nahka.
 - võite pärast määrimist kasutada fööni keskmisel temperatuuril, et vähendada kuivamisega umbes 2 minutit.
- Flexiseq'i kasutamine kaks korda päevas võib leevendada valu juba 2 päevaga. Täieliku mõju ilmumiseks võib aga kuluda mitu päeva toote pidevat kasutamist.
- Pärast avamist säilitada temperatuuril 8°C kuni 25°C ja kasutada kolme kuu jooksul.



Pange geeli ühtlaselt ümber liigese.



Määrige geel liigese ees- ja tagaküljel ühtlaselt laiali (ärge määrige põlvekedrale).



Laske Flexiseq geelil 10 minutit enne kinnikatmist kuivada.

6. Võimalikud kõrvaltoimed

- Flexiseq'iga seoses ei ole tõsisid kõrvaltoimeid teada.
- Kliinilistes testides põhjustas Flexiseq kasutuskohas kergeid nahaärritusi, nagu erüteemi, kuivust ja löövet. Need olid tavaliselt leebe kuni keskmise intensiivsusega, lühiajalised ja möödusid iseenesest. Ravisekkumine polnud vajalik.
- Kõrvaltoimed, mis puudutavad nahka ja nahaaluskudet (pehmet kudet kasutuspiirkonna naha all) võivad ilmuda umbes kaks nädalat pärast geeli kasutamise alustamist, kuid peaksid kaduma iseenesest, kui te toote kasutamist jätkate. Püsivate kõrvaltoimete tekkimisel vähendage annust (nt üks kord päevas kahe korra asemel). Kui see ei aita, siis lõpetage toote kasutamine, kuni probleem laheneb, milleks võib kuluda mitu päeva. Naha paranemise järel võite hakata toodet uuesti kasutama, kui puuduvad tõendid allergilisest reaktsioonist.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
- Koostoimeid ravimitega pole teada.



- Temperatuuripiirang (säilitada temperatuuril 8°C kuni 25°C)



- Hoiatus



- Järgige kasutusjuhiseid



- Tarvitada enne (KK.AAAA). Ärge kasutage toodet pärast kehtivusaja lõppu (vt märgistust tuubil ja karbil)



- Partii number (vt märgistust tuubil ja karbil)



- Tootja
MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luksemburg

- Flexiseq[®] ja Sequessome Technology[®] on Pro Bono Bio[®] kaubamärgid.

Juuni 2014

03/05/001



Pro Bono Bio[®]



03/05/001

Pro Bono Bio[®]